

Wichtige allgemeine Hinweise für die Durchführung der Ringversuche

Auflösung von lyophilisierten Ringversuchsproben

Öffnen Sie das Fläschchen vorsichtig und ohne Verlust von Lyophilisat.

Bitte beachten Sie die Auflösungshinweise auf dem Probenetikett! Lösen Sie den Inhalt der Fläschchen mit der auf dem Probenetikett angegebenen Menge des Lösungsmittels.

Verschließen Sie danach das Fläschchen vorsichtig. Lösen Sie den Inhalt durch gelegentliches Schwenken, Kippen und Drehen, möglichst unter Vermeidung von Schaumbildung, innerhalb von 30 Minuten bei Raumtemperatur vollständig.

Bitte setzen Sie die gelöste, gebrauchsfertige Probe wie Patientenmaterial für die Analyse ein. Auch im Hinblick auf die Haltbarkeit und Lagerung der Proben bitten wir Sie, diese wie Patientenmaterial zu behandeln.

Ergänzende oder abweichende Regelungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Protokollbogen.